

Technický list

CLEAMEN 520 dezi PPM

Objem: 1 L

Kód výrobku: VC520010099

Ev. č. v ČR: MZDR 1817/2018/SOZ

Rozhodnutí v SR: bio/873/D/05/2/CCHLP

Popis výrobku:

Dezinfekční a čistící prostředek je určený pro vlhký úklid. Lze použít ve veřejných prostorách, ve zdravotnictví (včetně dezinfekce zdravotnických přístrojů, instrumentária a zařízení) a pro dezinfekci při činnostech epidemiologicky závažných (úklid a dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúry, manikúry, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária). Cleamen 520 je zvláště vhodný pro dezinfekci ploch v provozech se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek.

Návod k použití:

Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek (viz. tabulka) mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm. Na větší plochy aplikovat prostředek pomocí vědra a mopu. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod. V tom případě naředit prostředek v poměru 1:50 s vodou (20ml do 1 litru) a pomůcky nechat v pracovním roztoku 30 minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu (viz. tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat-proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

Spektrum účinku: Baktericidní: bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC.
Fungicidní: většina mikroskopických hub.
Biocidní typ: 2,3 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství)

ředění	účinek na bakterie a plísně spektra: A, V	účinek na mykobakterie spektra: M, T
	účinná koncentrace a nezbytná doba koncentrace	
	30 minut	30 minut
1 litr	15 ml	20 ml
10 litrů	150 ml	200 ml

pH koncentráty: 5

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):

Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 5,5 g,

peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3 g,

chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,1 g.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Tmavěmodrá

pH: 5

Zápach: Charakteristický



Údaje o nebezpečnosti:

NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje 4-terc-butylycyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chraňte před mrazem. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Poškozený obal vyměňte za nový.

Balení: 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě

Uzávěr: bezpečnostní uzávěr, dávkovací uzávěr

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: info@cormen.cz, www.cormen.cz

